



TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Tensiomètre automatique et ses accessoires (câble secteur, tubulure adaptée, brassard adapté au patient)
- Solution décontaminante et chiffon propre

DÉROULEMENT DU PROTOCOLE

1. AVANT L'UTILISATION

- Se laver les mains.
- Choisir le brassard adapté au patient (le brassard doit couvrir 2/3 de l'arrière-bras au moins).
- Vérifier l'état visuel du brassard et du tuyau.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Allumer l'appareil et vérifier l'auto-test.
- Connecter le brassard au tuyau et le tuyau à l'appareil en vérifiant la qualité des connexions.

2. PENDANT L'UTILISATION

- Placer le brassard du côté opposé à la perfusion et au capteur de saturation quand le brassard est placé au membre supérieur.
- Respecter les indications de positionnement notifiées sur le brassard.
- Effectuer la première mesure.
- Régler ensuite la fréquence de gonflage du brassard et les alarmes en fonction des directives médicales.
- Après stabilisation du patient, adapter la fréquence de gonflage et les alarmes selon l'évolution du patient.
- Noter les valeurs dans le dossier médical et parapher.

3. APRÈS L'UTILISATION (MAINTENANCE UTILISATEUR)

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Déconnecter le brassard afin de pouvoir le nettoyer en prenant soin de ne pas mettre d'eau dans les tuyaux.
- Décontaminer l'appareil avec un chiffon imbibé d'une solution décontaminante selon le protocole de l'établissement.
- Enrouler le brassard et le ranger dans son sachet et/ou tiroir de l'appareil le cas échéant.
- Ranger l'appareil dans un endroit sûr et le brancher pour le recharger s'il est doté de batteries.
- Se laver les mains.
- En cas d'anomalie, contacter le technicien biomédical.

Version 2024-06

★ Cette fiche a été réalisée par les organisations suivantes : Pilotage : ONG Humatem / Expertise technique et rédaction : Professionnels médicaux de l'ONG Médecins sans Vacances et de l'ONG HUMATEM / Relecture et validation technique Professionnels médicaux de l'ONG Médecins sans Vacances et de l'ONG ULB-Coopération, professionnels biomédicaux de de l'ONG Humatem, de l'AFIB, de l'AAMB, MSF / Partenaire du projet Jenga Maarifa II : les ONG Médecins Sans Vacances et ULB-Coopération / **Partenaires financiers** : MEAE-CDCS / PADISS / Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Haute-Savoie (projet Jenga Maarifa II) et FHF/AFD (dispositif PRPH3)